



Roger Unlimited

Mehr bedeutende Verbindungen schaffen mit Roger.

Feuersteintagung 2025

Freuen Sie sich
über schnellere
Verbindungen



mit Roger
Unlimited.



PHONAK
life is on

Die Neuerungen zusammengefasst



Roger Touchscreen Mic 3

- ➔ Unbegrenzte Empfänger
- ➔ Individuell anpassbare Stummschaltungsanzeige
- ➔ Verbesserte Menünavigation



roger



Roger On 3

- ➔ Unbegrenzte Empfänger
- ➔ Wide Pointing Modus
- ➔ Kratzfestes Display
- ➔ Verbesserte Mobile App
- ➔ SmartMute



Roger Select 3

- ➔ Unbegrenzte Empfänger



Roger Table Mic 3

- ➔ Unbegrenzte Empfänger


Roger™ Touchscreen Mic.

Anleitung für Lehrkräfte



1 Einschalten

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige grün blinkt.
- Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um das Menü aufzurufen.

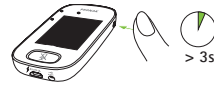


2 Verbindung zu Hörsystemen oder mehreren Roger-Mikrofonen herstellen

- Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Geräte eingeschaltet sind.
- Halten Sie das Roger Touchscreen Mic (TSM) in einem Abstand von maximal 10 cm zum Gerät.
- Tippen Sie auf „Connect“ (Verbinden).




! Für Hörsysteme:

- Der Schüler hört einen Signalton, der die Verbindung bestätigt.
- Zur Überprüfung wählen Sie „List Devices“ (Geräteliste) auf dem Roger TSM-Bildschirm. Es werden alle Geräte im Umkreis von 10 cm angezeigt.

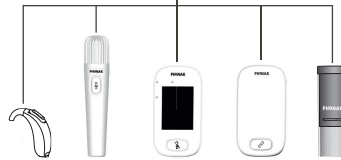

3 Tragen Sie das Gerät während des Unterrichts/Sprechens um den Hals.


- Befestigen Sie das Roger TSM am Trageband und tragen Sie es um den Hals.
- Stellen Sie das Band so ein, dass sich das Gerät in einem Abstand von maximal 20 cm zu Ihrem Mund befindet.
- Verwenden Sie die Stummschalttaste, um das Mikrofon zu aktivieren/deaktivieren.

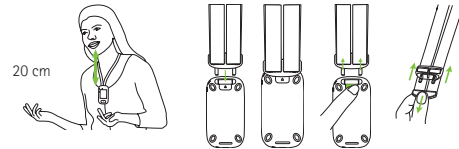

! Vermeiden Sie es, am Mikrofon zu reiben, darauf zu tippen oder es abzudecken, da dies die Geräusche verstärken kann.

4 An ein beliebiges Audiogerät anschließen

- Verwenden Sie ein 3,5 mm Audiokabel, das an die Kopfhörerbuchse oder den Audioausgang des Audiogeräts angeschlossen wird.
- Je nach Audioquelle ist möglicherweise ein Adapter erforderlich.

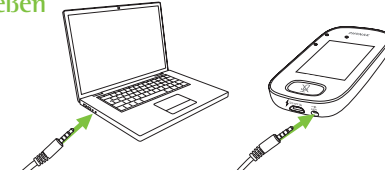


Wichtige Hinweise



Denken Sie daran, Roger am Ende des Schultages aufzuladen.

Roger TSM muss aufrecht positioniert werden. Es sollte nur im Gruppenmodus flach hingelegt werden, wie rechts dargestellt.

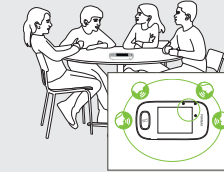

Roger TSM bleibt mit jedem kompatiblen Gerät über eine Entfernung von bis zu 25 Metern verbunden.

Statusanzeigen



Ein/Aus
Laden
Akku ist voll geladen



Ein/Aus
Laden
Akku ist voll geladen



Stumm



Eingeschaltet



Hauptmikrofon nicht verfügbar (Stellen Sie sicher, dass das Hauptmikrofon „1“ in Reichweite ist und nicht im Small Group Modus platziert wurde)



Gerät laden

Menüsymbole auf dem Bildschirm

Symbol	Funktion
	Öffnet das Menü Einstellungen des Mikrofons.
Einstellungen	
	Verbindet Roger-Geräte mit demselben Netzwerk wie das Mikrofon.
Verbinden	
	Prüft drahtlos, ob ein anderes Gerät verbunden ist oder ordnungsgemäß arbeitet.
Prüfen	
	Trennt ein Gerät vom Netzwerk des Mikrofons.
Trennen	
	Listet die Roger-Geräte auf, die mit dem Mikrofon in einem Klassenraum-Netzwerk verbunden sind.
Geräteliste	
	Zur Einstellung der Lautstärke eines Roger Dynamic SoundField DigiMaster Lautsprechers.
SoundField	

Symbol	Funktion
	Enthält eine unbegrenzte Anzahl von Roger-Empfängern für Hörsysteme mit RogerDirect.
RogerDirect	
	Öffnet das Menü Mik.-modus.
Mik.-modus	
	Generiert ein temporäres Sub-Netzwerk (wird verwendet, um zu einem einzelnen oder mehreren Schüler/n zu sprechen, ohne die übrigen Mitschüler zu stören).
SubNet	
	Keht von einem Subnetz zum Netzwerk des Mikrofons zurück.
Netzwerk	
	Verbindet mit einem anderen vorhandenen Mikrofon- oder Empfängernetzwerk.
JoinNet	
	Löscht das Netzwerk des Mikrofons (inkl. Subnetze).
NewNet	

Roger™ SoundField.

Anleitung für Lehrkräfte

Das Roger SoundField System umfasst die folgenden Lautsprecher: Roger DigiMaster 5000, DigiMaster 5000 V2, Roger DigiMaster 7000 und Roger DigiMaster 7000 V2.


1 Einschalten

- Schließen Sie den Roger DigiMaster Lautsprecher an eine Steckdose an.
- Betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Geräts, bis oben am Lautsprecher ein blaues Licht blinkt.



2 An das Roger Touchscreen Mic anschließen

- Schalten Sie das Roger Touchscreen Mic ein (siehe Anleitung für Lehrkräfte zum Roger Touchscreen Mic) und halten Sie es in einem Abstand von maximal 10 cm zum Roger DigiMaster Lautsprecher.
- Drücken Sie auf dem vorderen Bildschirm des Roger-Mikrofons auf „Connect“ (Verbinden). Nach dem Verbinden leuchtet die LED am Roger DigiMaster Lautsprecher blau.

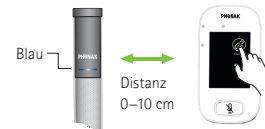

! Für die Roger DigiMaster 7000 oder 7000 V2 Lautsprecher:

Es können mehrere Roger DigiMaster Lautsprecher miteinander verbunden werden. Führen Sie Schritt 2 nacheinander durch.

3 An ein beliebiges Audiogerät anschließen

Schließen Sie das Gerät über das 3,5 mm Audiokabel an der Unterseite der Einheit an ein beliebiges anderes Gerät für den direkten Audioeingang an.

! Für den Roger DigiMaster 5000 V2 und 7000 V2 kann ein bluetoothfähiges Gerät für Audio-Streaming gekoppelt werden.

- Drücken Sie die Bluetooth-Taste an der Unterseite des Lautsprechers, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (blinkt 60 Sekunden lang schnell blau).
- Koppeln Sie die Geräte im Bluetooth-Einstellungsmenü der Audioquelle (z. B. Laptop oder Mobiltelefon). Ein zweimaliges Blinken der blauen LED am Roger DigiMaster Lautsprecher zeigt an, dass die Kopplung erfolgreich war. Um die Bluetooth-Kopplung zu löschen, halten Sie die Bluetooth-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.



Wichtige Hinweise

Der Roger DigiMaster Lautsprecher bleibt bis zu einer Entfernung von 25 Metern mit dem Roger Touchscreen Mic verbunden.



Bis zu 25 Meter



In einem Netzwerk können maximal 20 Roger DigiMaster 7000 V2 Lautsprecher gleichzeitig verbunden sein.

Statusanzeigen



- Roger DigiMaster aus
- Standard-Betriebsmodus
- Roger-Mikrofon aus / außer Reichweite
- Stumm
- Lautstärke +/-
- Software-Update
- Techniker anrufen

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.


Roger™ Multimedia Hub.

Anleitung für Lehrkräfte




1 Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis eine grüne LED am Gerät zu blinken beginnt.

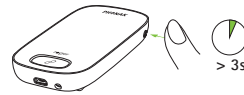


2 An eine Audioquelle anschließen

- Schließen Sie das Gerät mit einem 3,5 mm Audiokabel an die Kopfhörerbuchse und den Audioausgang des Audiogeräts (z. B. Laptop, Telefon, Fernsehbildschirm) an.
- Stellen Sie sicher, dass die Audiowiedergabe läuft und die Lautstärke aufgedreht ist.
- Je nach Audioquelle ist möglicherweise ein Adapter erforderlich.

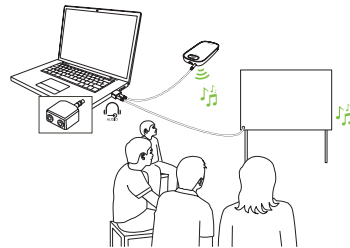

3 Verbindung mit einem bestehenden Roger-Netzwerk im Klassenzimmer herstellen

- Verwenden Sie immer das Roger Touchscreen Mic als primäres Netzwerkgerät, um eine Verbindung mit dem Roger Multimedia Hub (MMH) herzustellen.
- Platzieren Sie den Roger MMH in einem Abstand von maximal 10 cm zum Roger Touchscreen Mic und tippen Sie auf „Connect“ (Verbinden).

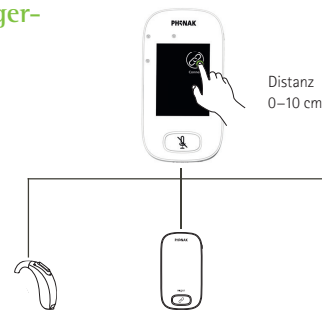

ⓘ Drücken Sie nicht die Taste „Connect“ (Verbinden) auf dem Roger MMH, da dadurch ein neues Netzwerk erstellt wird.

4 Verbindung zu Hörsystemen ohne andere Roger-Geräte herstellen

Halten Sie den Roger MMH in einem Abstand von maximal 10 cm zum Hörsystem und tippen Sie auf „Connect“ (Verbinden). Stellen Sie sicher, dass das Hörsystem eingeschaltet ist. Der Schüler hört einen Signalton, der die Verbindung bestätigt.




Wichtige Hinweise




Denken Sie daran, das Gerät am Ende des Schultages aufzuladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel ordnungsgemäß an die Geräte angeschlossen sind, indem Sie 3,5 mm Kabel von der Audioquelle (z. B. Fernsehbildschirm, Projektor) verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke aller verwendeten Geräte aufgedreht ist.
- Verwenden Sie einen Audio-Splitter nur dann, um Nicht-Hörsystemträgern Zugang zu Sprache zu ermöglichen, wenn Roger DigiMaster nicht verfügbar ist.
- Bitte beachten Sie, dass jeweils nur ein Roger Multimedia Hub in einem Netzwerk verwendet werden kann. Der Roger Multimedia Hub kann keine Verbindung zum Roger WallPilot herstellen, es sei denn, ein Roger Touchscreen Mic wird im selben Netzwerk verwendet.

Statusanzeigen

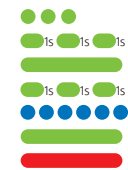

Ein/Aus
Laden
Akku ist voll geladen
Audioübertragung
Verbinden
Verbindung erfolgreich
Verbindung fehlgeschlagen

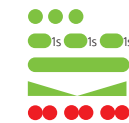

Ein/Aus
Laden
Akku ist voll geladen
Eingeschaltet
Gerät laden



Roger Multimedia Hub = Sekundär



Hauptmikrofon nicht verfügbar (Stellen Sie sicher, dass das Hauptmikrofon „1“ in Reichweite ist und nicht im Small Group Modus platziert wurde)

Roger Übersicht & Roger Instagram

Roger Showpad Übersicht



Roger_by_Phonak auf Instagram





Gemeinsam
verändern wir
Leben