



# WAGENKNECHT

NEUE WEGE GEHEN

# Wer ist Wagenknecht?

Durch die besondere Unternehmensstruktur und der Schwerpunktlegung kennen wir die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden:innen und Partner:innen und können im Bereich Hörtechnik maßgeschneiderte Lösungen bieten,




## Außendienst

Überregional/  
standortunabhängig  
in ganz Deutschland  
und Österreich



## Spezialisierung

Wir ergänzen die Hörsystem-  
Anpassung über die Ohren  
hinaus mit Höranlagen und sind  
Experten auf diesem Gebiet

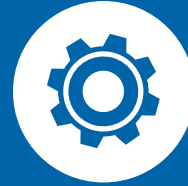

## Netzwerk

Zusammen bringt  
unser Team über 70  
Jahre Kompetenz im  
Bereich DÜA mit

**Dabei ersetzen wir nicht den regionalen Hörakustiker,  
sondern möchten mit unserem Schwerpunkt ergänzen.**

# Unser Außendienst Team



Dennis Wagenknecht

**Geschäftsführung**

+49 163 8713415

dennis.wagenknecht@der-  
hoerspezialist.de



Michael Quante

**Gebietsleitung West**

+49 176 61203073

michael.quante@wagenknecht-  
hoeren.de



Ottmar Braschler

**Gebietsleitung Südwest**

+49 176 31737934

ottmar.braschler@wagenknecht-  
hoeren.de



Iris Oerkwitz

**Gebietsleitung Nord**

+49 176 61843379

iris.oerkwitz@wagenknecht-  
hoeren.de



Mathias Hoff

**Gebietsleitung Südost**

+49 176 61419587

mathias.hoff@wagenknecht-  
hoeren.de



Nadine Gander

**Gebietsleitung Österreich**

+43 660 5433295

nadine.gander@wagenknecht-  
t-austria.at



# Monatliche digitale Fortbildung

**JEDEN LETZTEN MITTWOCH IM MONAT 16.30 UHR**

# Monatliche digitale Fortbildungen

Jeden letzten Mittwoch im Monat um 16.30 Uhr

## Themen rund um das Thema Hören & Hörübertragungsanlagen.

Gerichtet an Lehrkräfte aus dem sonderpädagogischen Bereich Hören und Kommunikation, sowie Mitarbeitende des mobilen Dienstes/ Gemeinsamen Lernens.

Kostenlos, kurzweilig und mit Zeit für Austausch und individuelle Fragen.

Teilen Sie uns gern Ihre **Mailadresse** mit, um immer eine **direkte Einladung** zu erhalten und keine Schulung mehr zu verpassen.



Bereits über  
150  
Abonnement  
:innen

# Schulungsplan 2025/ 2026

(fast) immer online am letzten Mittwoch des Monats um 16:30 Uhr



**Sep** **Phonak Roger Schulportfolio**  
Was gibt es und wofür wird es eingesetzt?

**Okt** **Bluetooth Auracast**  
Was kann es, wie kann es in der Schule eingesetzt werden und welche Alternativen gibt es?

**Nov** **Ausstattung in der Inklusion**  
Was braucht man und wie ist die Kostenübernahme geregelt?

**Dez** **Weihnachtsferien**

**Jan** **Höranstrengung und Raumakustik**  
Gute Raumakustik vs. SoundField – Was hilft wann?

**Feb** **Luftleitungs- Hörsysteme**  
Überblick Hinter-dem-Ohr & Im-Ohr; CROS & BiCROS; Roger Focus II bei AVWS

**Mär** **Osterferien**

**Apr** **CI's & Knochenleitungssysteme**  
Überblick der Systeme und deren Anbindung an eine Hörübertragungsanlage

**Mai** **Ton – und Sprachaudiogramm**  
Interpretation und Indikation

**Jun** **Sommerferien**



# Coming soon...

Schon jetzt anmelden, um unseren Blog zu abonnieren und keine Infos zu verpassen



**Neuer Wagenknecht Blog**  
mit regelmäßigen Beiträgen zu  
Produkten, Neuheiten,  
Fachlichem und über uns und  
unseren Service






# Leasing Rückläufer

**PRODUKTE DEUTLICH GÜNSTIGER**

# Leasing Rückläufer



Sind nach Vertragsende durchschnittlich nur vier Jahre alt und noch voll funktionsfähig. Werden von uns geprüft und können günstig erworben werden und sind dann Eigentum des Käufers.

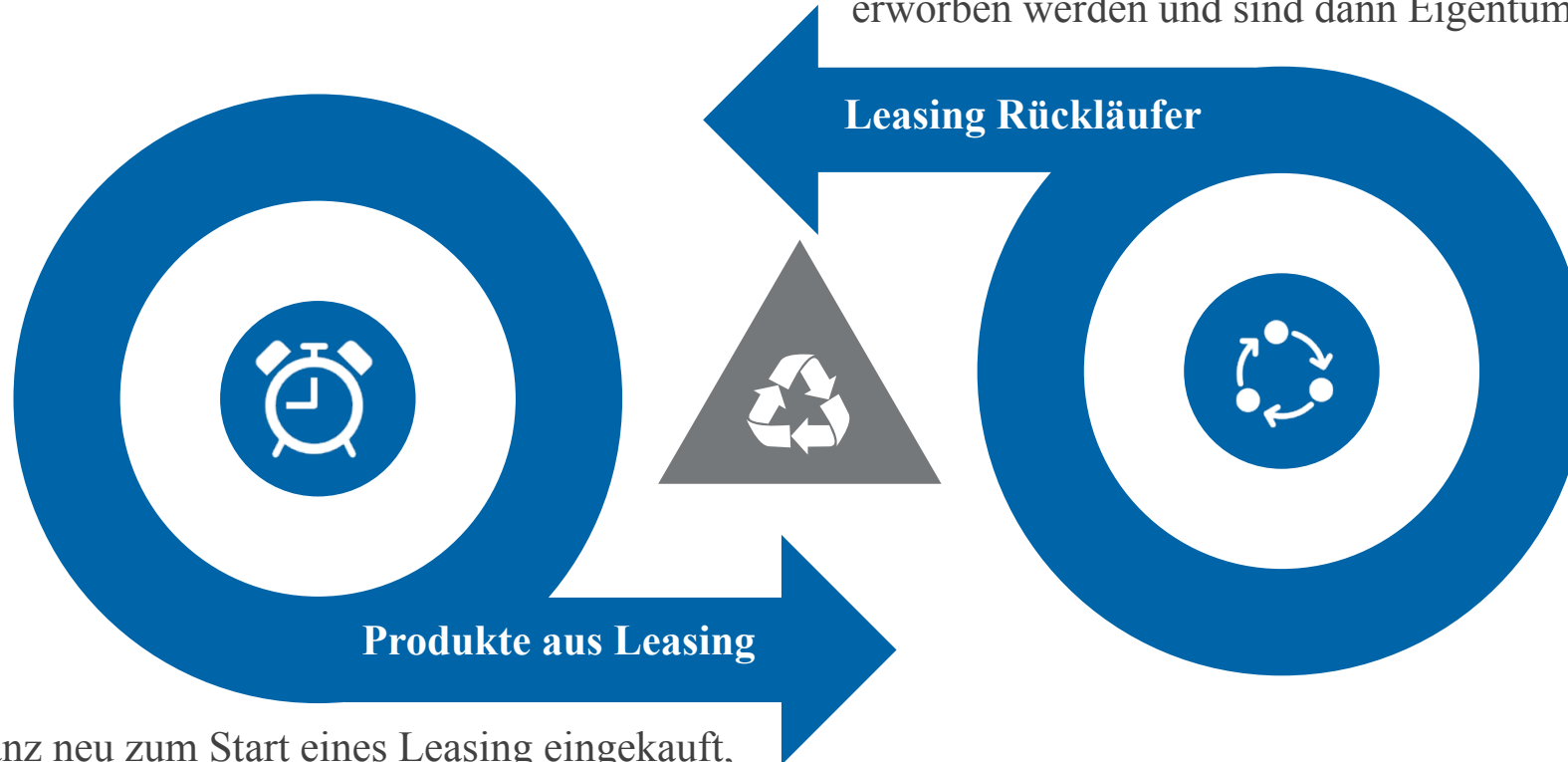

Wurden häufig ganz neu zum Start eines Leasing eingekauft, werden regelmäßig gewartet und bleiben während der Laufzeit unser Eigentum.



# Auracast

**SCHON HEUTE AN MORGEN DENKEN  
UND IN DER PLANUNG  
BERÜCKSICHTIGEN**

# Was ist eigentlich Auracast?

Das sagt die Website von Bluetooth



Auracast™ ermöglicht Audiosendern wie Smartphones, Laptops, Fernsehern oder Beschallungsanlagen die Übertragung von Audiosignalen an eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern in der Nähe, einschließlich Lautsprechern, Ohrhörern oder Hörgeräten.

Auracast™-Assistenten wie Smartphones, Smartwatches oder Hörgeräte-Fernbedienungen scannen nach Auracast™-Werbung und bieten eine Benutzeroberfläche (UI), über die der Benutzer eine Auracast™-Übertragung auswählen kann, der er beitreten möchte



<https://www.bluetooth.com/de/auracast/faq/#:~:text=Auracast%E2%84%A2%20erm%C3%B6glicht%20Audiosendern%20wie,einschlie%C3%9Flich%20Lautsprechern%2C%20Ohrh%C3%B6rem%20oder%20H%C3%B6rger%C3%A4ten.>

# Wie funktioniert es?



## Auracast Sender

z. B. Mikrophon, Multimedia-Sender, Smartphone; nimmt das Signal an/ auf und sendet es zum Empfänger



## Auracast Assistent

Z. B. Smartphone, spezielle Fernbedienung; zeigt das Signal an, damit es ausgewählt werden kann, um es zu hören

## Auracastfähiger Empfänger

Empfängt das Signal, wenn es über den Auracast Assistent gewählt wurde und macht es über einen Kopfhörer oder ein Hörgerät hörbar



# Workshop Agenda



**01**

## **Phonak Roger & Auracast zum Reinhören & Ausprobieren**

Kurze Vorstellung der Roger Produkte für die Schule und wie Sie in der Praxis um Auracast Produkte erweitert werden können...

30 min

**02**

## **Messtechnischer Nachweis des Nutzen einer DAÜ**

Vorstellung Messaufbau und was es bei der Messung zu beachten gibt...

30 min



## **Optionale Alternative: Offene Runde für individuelle Fragen**

Wir stehen für individuelle Fragen & mit Produkten zum Ausprobieren bereit...





Vielen Dank für Ihr Vertrauen

WAGENKNECHT – NEUE WEGE GEHEN